

SURFANIOS Premium



Détergent Désinfectant Sols et Surfaces

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation

Application biocide: pour les surfaces générales.

- Double action : Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée
- Large spectre antimicrobien en temps de contact court
- Agent séquestrant facilement biodégradable



SURFANIOS Premium

Détergent Désinfectant Sols et Surfaces



Surfanios Premium
Sachets de 20 ml



Surfanios Premium
Flacon doseur 1L



Surfanios Premium
Bidon de 5L

Caractéristiques du produit

- Solution verte
- pH du produit pur : 10,9
- pH du produit dilué (0,25%) : environ 8,5
- Densité à 20°C : 1 009 g/ml
- Indice de réfraction : 1,3587

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Bactéricide - Actif selon: EN 13727* (5 min 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Levuricide - Actif selon: EN 13624* (15 min, 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Tuberculocide - Actif selon EN 14348*	0.50 %	30 min
Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*	0.25 %	5 min
Virucide à spectre limité selon EN 14476*	2.0 %	30 min
EN 14476* Adenovirus	1.0 %	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	1.0 % / 2.0 %	60 min / 30 min

*conditions de saleté

Informations sur le conditionnement et les commandes

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
SURFANIOS Premium Sachets	500 x 20 ml	1917129
SURFANIOS Premium (pompe doseuse de 20 ml)	12 x 1 L	1917092
SURFANIOS Premium Bidons	4 x 5 L	1917036
SURFANIOS Premium Bidon de 5 L avec canule	5 L	1917427



Zone d'application

Détergent Désinfectant Sols et Surfaces.

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation.

Application Biocide: pour les surfaces générales.

Mode d'emploi

Solution concentrée.

Diluer le concentré avec de l'eau jusqu'à la concentration souhaitée.

Pour diluer par exemple à une concentration de 0,25% (2,5 ml / l), ajouter 20 ml pour 8 litres d'eau froide ou chaude (max. + 60 °C).

Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²).

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Pour les dispositifs médicaux :

Rincer abondamment à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit.

Pour les applications biocides :

Le rinçage est inutile sauf pour les zones à traiter en contact avec la peau ou les denrées alimentaires.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

Composition

100g de produit contiennent : 5,1g de N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9), 2,5g de chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5), tensioactifs non ioniques, agents séquestrants, parfum, colorant et excipients.

Stockage

Stockage entre +5°C et +25°C.

Certificats


L'ensemble des activités antimicrobiennes de SURFANIOS PREMIUM est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

Les dispositifs médicaux et biocides sont à utiliser avec précaution

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif médical doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre.

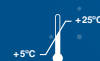

USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS.